

# Guida all'uso del set per infusione Cleo™ 90




Consultare le Istruzioni per l'uso per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni.

## Inserimento nel sito e collegamento del set tubo

1. Lavarsi e asciugarsi bene le mani.
2. Preparare il sito di applicazione e lasciarlo asciugare.
3. Ruotare il cappuccio per rimuoverlo.
4. Esaminare il dispositivo verificando che siano presenti sia l'adesivo che l'ago di inserimento.
5. Premere con decisione fino a sentire un clic; tenere premuto per 5 secondi; staccare con un movimento rettilineo.
6. Verificare che l'ago si sia ritirato.
7. Premere per fissare l'adesivo.
8. Collegare il tubo e riempire seguendo il manuale d'uso della pompa.\*
9. Premere verso l'interno i braccetti del connettore al sito e farlo scorrere per aprirlo completamente.
10. Collegare il tubo al sito scegliendo la posizione più adeguata. Il dispositivo Cleo 90 ha otto posizioni possibili.
11. Chiudere il connettore; un clic udibile ne indica la chiusura corretta.
12. Riempire la cannula con il farmaco.



  - Il volume di riempimento della cannula di 6 mm è pari a 0,002 ml.
  - Il volume di riempimento della cannula di 9 mm è pari a 0,003 ml.

## Scollegamento

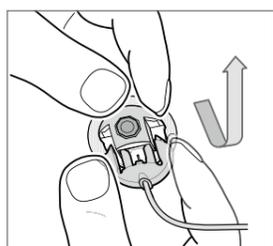

Aprire il connettore premendone i braccetti verso l'interno e facendolo scorrere per aprirlo completamente.

## Ritiro del sito di iniezione

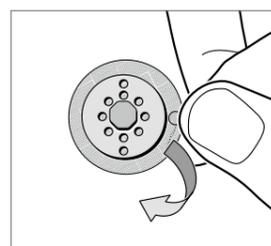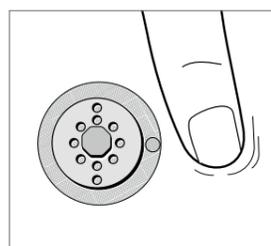

## Sostituzione del catetere Cleo 90

Sostituire il catetere in base alla prassi e alle procedure della propria struttura.

\* Avvertenza: Non riempire mai la cannula con farmaco o insulina mentre il set per infusione è collegato al corpo, altrimenti si potrebbe provocare la somministrazione accidentale di un bolo di farmaco.