



Product Reference Guide

グリッパーマイクロ™

植込みポート用医薬品注入器具
穿針時計分離型・針刺し防止機構付き
ポート専用針



グリッパーマイクロ™

- › 小さく目立たないインフュージョンサイト（留置部、以下留置部）
- › はっ水性のパッド
- › 尖っていない形状の留置針先端

1. 穿刺



- › 施設の基準に従い穿刺部位を準備、消毒します。
- › プライミング後、ニードルガードを外します。
- › ベースを保持し、ポートに対して直角に針を穿刺します。

2a. 針（内針）を抜く



- › 背面からベースの両側を指で押さえポートを安定させます。
- › もう片方の手の人差し指をセーフティアームの先端にかけます。

2b.



- › タブを押し込む。

2c.



- › セーフティアームを「カチッ」と音がして動かなくなるまでまっすぐ後ろに引き上げます。
- › 針とベースが外れます。

3. 廃棄 ～ 固定



- › セーフティアームを鋭利器材専用医療廃棄物容器に廃棄します。
- › 血液の逆流を確認します。
- › ドレッシング材を貼り固定します。

4. 抜針



- › 留置部の両側に指を置きます。
- › もう片方の手でポートを安定させます。
- › 留置部をまっすぐ上に上げ、施設の基準に従い廃棄します。

販売名: グリッパーマイクロ
認証番号: 22200BZX00597000

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者

ICUメディカルジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

受注センター: 0120-582-855

icumedical
human connections

For safe and proper use, refer to the Instructions for Use.

© 2026 ICU Medical Inc. | www.icumed.com | C26-6782-JP | 0802001 | Page 1 of 1

www.icumed.com