



Guide de référence pour le connecteur à déplacement neutre sans aiguille

Clave™ Neutron™



Purger et raccorder

- Retirez le dispositif/ensemble Clave Neutron de son emballage et fixez une seringue de rinçage au raccord Luer femelle.
- Retournez le dispositif et injectez la solution de rinçage. Tirez sur la seringue et injectez à nouveau la solution de rinçage pour purger et activer le dispositif.
- Fixez le connecteur/l'ensemble Clave Neutron à l'embase du cathéter du patient.
- Injectez le reste de la solution de rinçage.
- Retirez la seringue de rinçage et jetez-la.



Désinfecter pour protéger

- Avant d'accéder à un connecteur Clave Neutron, désinfectez-le conformément au mode d'emploi ou au protocole de l'établissement*.



Administrier

- Fixez la tubulure IV, la seringue ou le support pour flacon de sang au connecteur Clave Neutron en insérant et en tournant le raccord Luer jusqu'à constater une friction.
- Ne serrez pas le raccord Luer au-delà de la friction, car cela peut l'endommager, ainsi que le connecteur Clave Neutron.



Rincer après chaque utilisation

- Rincez le connecteur Clave Neutron avec de la solution saline normale ou conformément au protocole de l'établissement.
- Procédez à un rinçage habituel, conformément au protocole de l'établissement, afin de maintenir la perméabilité du cathéter.
- Remplacez le connecteur Clave Neutron conformément au protocole de l'établissement et aux directives du CDC.

Conseils

- Si vous utilisez un ensemble Neutron avec un filtre, orientez le filtre lors de l'installation initiale, de manière à ce que l'entrée se trouve en position verticale au-dessus de la sortie. Le filtre se purge automatiquement en position verticale.
- Les procédures de perfusion électrique ne doivent pas dépasser 350 psig ou 10 mL par seconde de produit de contraste. Les ensembles de tubes haute pression ou les ensembles d'extension retirables fabriqués avec des tubes haute pression sont indiqués dans le nom/la description du produit.
- Pour la déconnexion, saisissez le connecteur Clave Neutron et tournez le raccord Luer correspondant pour l'éloigner du connecteur Clave Neutron jusqu'à ce qu'il se détache.

Avertissement : les connecteurs Clave peuvent s'avérer incompatibles avec certains connecteurs Luer mâles, notamment les seringues en verre préremplies. Pour éviter d'endommager le connecteur Clave, les seringues ou les raccords Luer mâles, ce qui pourrait provoquer des retards d'administration du médicament et d'éventuels effets indésirables graves, les utilisateurs doivent vérifier que le diamètre interne des raccords Luer ou des seringues correspondants est compris entre 1,587 mm (0,062 po) et 2,794 mm (0,110 po). Vérifiez le diamètre interne du connecteur Luer mâle de la seringue correspondante avant de l'utiliser pour accéder au Clave. Les produits hors de ces tolérances dimensionnelles ne doivent pas être utilisés.

* Désinfection conformément au mode d'emploi du connecteur Neutron ICU Medical = désinfectez-le avec une lingette d'alcool isopropylique à 70 % en effectuant un mouvement circulaire dynamique pendant 3 secondes et laissez-le sécher.



L'option de rinçage du connecteur Clave Neutron à l'aide d'une solution saline est conçue pour aider à réduire le risque de thrombocytopénie induite par l'héparine (TIH).

icumedical
human connections