



Guide de référence pour les rampes NanoClave™ Système de perfusion multiport



Désinfecter pour protéger

- › Lors de la fixation d'une nouvelle rampe NanoClave, purgez chaque port latéral du connecteur et la ligne principale de la tubulure en raccordant une solution pour purger ou une solution saline normale, conformément au protocole de l'établissement.
- › Avant d'accéder à un connecteur NanoClave, le site d'injection doit toujours être désinfecté à l'aide d'un antiseptique approuvé, selon le protocole de l'établissement.
- › Nettoyez le site d'injection conformément au protocole de l'établissement en respectant les durées de nettoyage et de séchage.



Administrer

- › Connectez la tubulure IV ou la seringue au connecteur NanoClave en insérant et en tournant le raccord Luer jusqu'à constater une friction.
- › Les raccords Luer ne doivent pas être serrés au-delà de la friction, car cela peut les endommager, ainsi que le connecteur NanoClave.



Rincer après chaque utilisation

- › Rincez le connecteur de la rampe NanoClave conformément au protocole de l'établissement. Après une utilisation avec du sang, la rampe NanoClave peut être nettoyée par rinçage et ne nécessite pas d'être changée.
- › Procédez au rinçage habituel, conformément au protocole de l'établissement afin de maintenir la perméabilité du cathéter.
- › Changez la rampe NanoClave conformément au protocole de l'établissement.



L'option de rinçage du NanoClave à l'aide d'une solution saline est destinée à réduire le risque de thrombopénie induite par l'héparine (HIT).