



Kit de perfusion Cleo™ 90

Kit de perfusion sous-cutanée tout-en-un

Les avantages du kit de perfusion Cleo 90 sont manifestes

Conception tout-en-un

Le kit de perfusion Cleo 90 préassemblé est doté d'un boîtier unique et exclusif qui comprend un introducteur et une canule avec tubulure pour faciliter les insertions et vous permettre de contrôler la vitesse d'insertion.

Sécurité de l'aiguille intégrée

Le kit de perfusion Cleo 90 est un système doté de son propre dispositif de

protection d'aiguille. L'aiguille intégrée se rétracte automatiquement dans son boîtier après l'insertion, réduisant ainsi le risque de blessures accidentelles par piqûre d'aiguille.

Pansement hypoallergénique

Le petit pansement adhésif transparent est conçu pour respirer et rester en place avec un minimum d'adhésif. Sa languette détachable exclusive facilite également le retrait.

Raccord à 360° flexible

Le raccord de tubulure du site à 360° Flex Attach™ permet une rotation à 360° sur site renforçant la flexibilité.

Formation facile

Le kit de perfusion Cleo 90 peut être inséré d'un seul mouvement et d'une seule main. Conçu avec un raccord Luer standard, Cleo peut être utilisé avec n'importe quelle pompe dotée d'un raccord Luer.


Il suffit de dévisser, d'insérer et de connecter



Dévissez le capuchon pour l'ouvrir.



Insérez la canule. Appuyez fermement sur le dispositif jusqu'à entendre un déclic, puis maintenez la pression pendant au moins 5 secondes. Retirez délicatement l'applicateur.

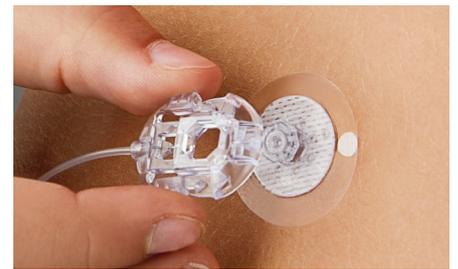

Raccordez la tubulure.

Une gamme complète de kits de perfusion sous-cutanée adaptés aux besoins individuels

Kit de perfusion Cleo 90 — Cathéter droit



Raccord Luer Lock standard

Référence	Longueur de la canule (mm)	Longueur de la tubulure
21-7220-24	6	61 cm
21-7221-24	6	79 cm
21-7222-24	6	107 cm
21-7230-24	9	61 cm
21-7231-24	9	79 cm
21-7232-24	9	107 cm

Fourni stérile dans des boîtes de 10 unités
Aiguille d'introduction 28G et canule 25G

Ce produit est conforme à la législation en vigueur et porte le marquage CE correspondant (2797). Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi officiel. Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié.

icumedical
human connections