












Schulungshandbuch für das Cleo™ 90 Infusions-Set

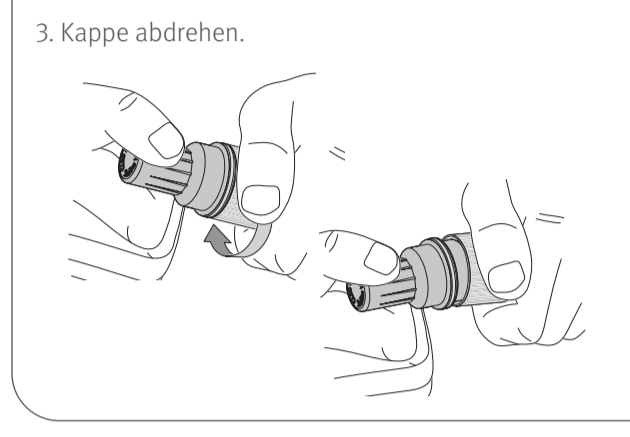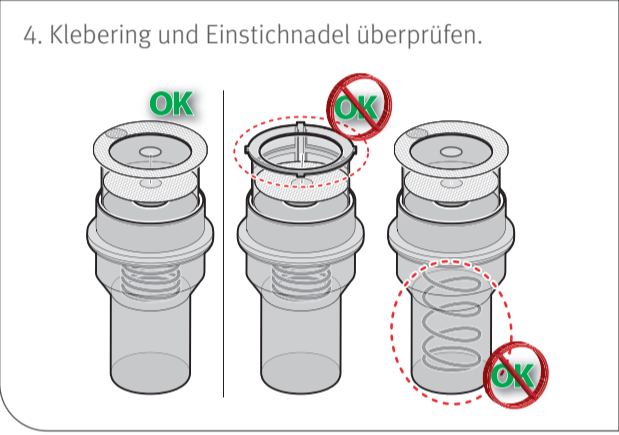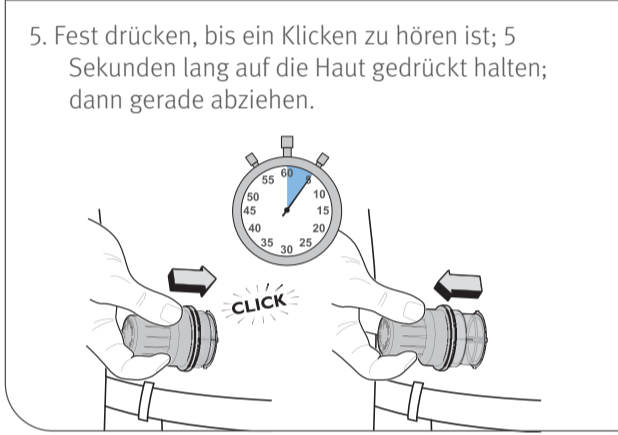


Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

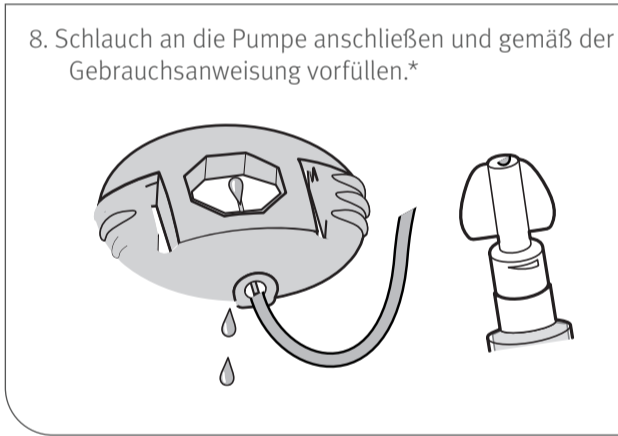Einstichstelle vorbereiten und Schlauchsatz verbinden



1. Hände gründlich waschen und trocknen.
 
2. Einstichstelle vorbereiten und trocknen lassen.
 
3. Kappe abdrehen.
 
4. Klebering und Einstichnadel überprüfen.
 
5. Fest drücken, bis ein Klicken zu hören ist; 5 Sekunden lang auf die Haut gedrückt halten; dann gerade abziehen.
 
6. Sicherstellen, dass die Nadel sich zurückgezogen hat.
 
7. Andrücken, um den Klebering zu fixieren.
 
8. Schlauch an die Pumpe anschließen und gemäß der Gebrauchsanweisung vorfüllen.*
 
9. Laschen des Einstichstellenkonnektors nach innen drücken und vollständig aufschieben.
 
10. Schlauch mit der Einstichstelle am Körper verbinden und dazu die am besten geeignete Position wählen. Das Cleo 90 verfügt über 8 mögliche Positionen.
 
11. Konnektor schließen, bis ein Klickgeräusch den Schließvorgang bestätigt.
 
12. Kanüle mit Medikament füllen.
 - › Die 6-mm-Kanüle hat ein Vorfüllvolumen von 0,002 ml.
 - › Die 9-mm-Kanüle hat ein Vorfüllvolumen von 0,003 ml.

Trennung

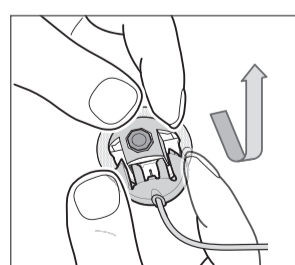

Konnektor öffnen. Hierzu Laschen des Einstichstellenkonnektors nach innen drücken und vollständig aufschieben.

Abnehmen von der Einstichstelle

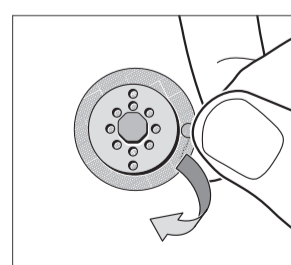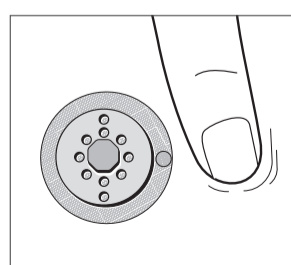

Wechseln des Cleo 90 Katheters

Den Katheter gemäß den Richtlinien und Verfahrensweisen der jeweiligen Einrichtung oder der erfolgten Patientenschulung wechseln.

* Warnhinweis: Füllen Sie den Schlauch niemals mit Medikamenten oder Insulin, während das Infusionsset an Ihren Körper angeschlossen ist, da Sie sonst einen unbeabsichtigten Medikamentenbolus abgeben könnten.

Das Produkt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung (2797). Weitere Informationen, Warnhinweise und/oder Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

© 2026 ICU Medical Inc. | C26-5739-2-EMEA-DE

icumedical
human connections

Deutschland: +49 (0)89 242959 – 0
Österreich: +43 (0)1 8906444 – 0
www.icumed.com