



Cleo™ 90 Infusions-Set

Kompaktes subkutaner Infusions-Set

Die Vorteile des Cleo 90 Infusions-Sets liegen auf der Hand

Kompaktes Design

Das vormontierte Cleo 90 Infusions-Set verfügt über ein einzigartiges, von uns entwickeltes Gehäuse, das mit einer Einführhilfe und einer Kanüle ausgestattet ist, um die Einführung zu erleichtern und die Einführgeschwindigkeit zu steuern.

Sicherheit durch eine umschlossene Nadel

Das Cleo 90 Infusions-Set ist ein System mit integriertem Schutz vor

Nadelstichverletzungen. Die umschlossene Nadel fährt nach dem Einstechen automatisch in das Gehäuse ein, wodurch das Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen minimiert wird.

Hypoallergene Kontaktfläche

Der kleine, transparente Klebeverband ist luftdurchlässig und bleibt an Ort und Stelle – mit einem Minimum an Klebematerial. Die von uns entwickelte Freigabehilfe erleichtert auch die Entfernung.

Flexible 360°-Verbindung

Die Flex Attach™ 360°-Schlauchverbindung ermöglicht die Rotation direkt an der Einstichstelle und bietet somit größere Flexibilität.

Leicht anzuwenden

Das Cleo 90 Infusions-Set kann mit einer Hand und in einer Bewegung angebracht werden. Cleo ist mit einem Standard-Luer-Anschluss ausgestattet und kann mit jeder Pumpe mit Luer-Anschluss verwendet werden.

Einfach nur drehen, zusammenschieben und anschließen



Kappe abdrehen.



Kanüle einsetzen. Produkt fest andrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist; anschließend 5 Sekunden lang gedrückt halten. Gerade abziehen.



Schlauchsatz verbinden.

Ein umfassendes Sortiment an subkutanen Infusions-Sets, ausgerichtet auf die Anforderungen des jeweiligen Patienten

Verschiedene Nadellängen, 6 mm und 9 mm.

Cleo 90 Infusions-Set – Katheter ohne Winkelung



Standardmäßige Luer-Lock-Verbindung

Artikelnummer	Kanülenlänge (mm)	Schlauchlänge
21-7220-24	6	61 cm (24")
21-7221-24	6	79 cm (31")
21-7222-24	6	107 cm (42")
21-7230-24	9	61 cm (24")
21-7231-24	9	79 cm (31")
21-7232-24	9	107 cm (42")

Steril, in 10er-Packungen

Das Produkt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften und verfügt über die entsprechende CE-Kennzeichnung. Weitere Informationen, Warnhinweise und/oder Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

© 2023 ICU Medical Inc. | P23-5739-EMEA-DE

icumedical
human connections

Deutschland: +49 (0)89 242959 – 0 | E-Mail: SM-bestellung@icumed.com
Österreich: +43 (0)1 8906444 – 0 | E-Mail: SM-AT.office@icumed.com
www.icumed.com