

Guida di riferimento per il connettore per emodialisi senza ago

Tego™



Collegare il Tego al catetere del paziente

- › Usare una tecnica asettica per rimuovere Tego dalla confezione
- › Riempire Tego in conformità al protocollo/alla procedura della struttura
- › Rimuovere il cappuccio e collegare Tego al dispositivo di accesso vascolare desiderato



Pulire con un tampone il Tego prima di ogni accesso

- › Pulire il sigillo in silicone del connettore Tego prima di ogni utilizzo in conformità al protocollo della struttura
- › Non utilizzare aghi, cannule smussate o cappucci Luer per accedere al connettore Tego



Accesso al connettore Tego

- › Collegare i dispositivi o le siringhe di somministrazione spingendo direttamente nei dispositivi di accesso Tego per infusioni
- › Quando si utilizza una connessione Luer Slip, inserire solo per metà girando leggermente in senso orario. Durante la rimozione, applicare lo stesso movimento di rotazione in senso orario. Non serrare eccessivamente.



Irrigazione del connettore Tego

- › Clampare la linea prima di scollegarla dal Tego e tra una sessione di dialisi e la successiva secondo le pratiche cliniche e del produttore del catetere indicate
- › Smaltire il dispositivo in conformità al protocollo della struttura

Precauzioni: il dispositivo deve essere sostituito in conformità alle attuali linee guida riconosciute per la terapia endovenosa. Tego è stato convalidato per l'efficacia funzionale e microbiologica fino a sette giorni.

Caratteristiche funzionali

- › Il percorso del fluido lineare può gestire portate superiori a 600 mL/min
- › Resta in posizione durante l'intero periodo di trattamento in emodialisi
- › Convalidato per l'uso continuo sul paziente fino a sette giorni
- › La tenuta in silicone rimane chiusa quando non è attivato, chiudendo il percorso del fluido ed eliminando l'esposizione al sangue



Il lavaggio opzionale con soluzione salina di Tego è concepito per contribuire a ridurre il rischio di trombocitopenia indotta da eparina (TIE).