



Guida di riferimento del prodotto


Riscaldatore di fluidi Hotline™ (HL-90)

Set di riscaldatori di fluidi Hotline™ (L-70, L-70NI)

Guida dettagliata

Importante: Per istruzioni, controindicazioni, avvertenze e indicazioni di attenzione dettagliate, nonché relative Istruzioni per l'uso per informazioni specifiche sui set monouso, si prega di fare riferimento al Manuale dell'operatore fornito insieme al prodotto.

Avvertenza: Riempire il percorso della soluzione di ricircolo prima di effettuare il collegamento al set di prolunga endovenosa, per confermare l'assenza di rotture tra il percorso della soluzione di ricircolo e quello endovenoso.

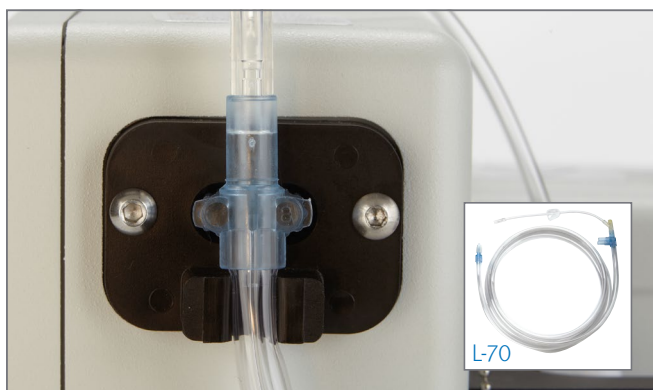

Passaggio 1

- › Inserire il connettore a cannule gemelle sul set di riscaldamento per fluidi Hotline nella presa.




Passaggio 3

- › Collegare il fluido endovenoso e il set di somministrazione endovenosa al set di riscaldamento per fluidi Hotline.
- › Riempire completamente il fluido endovenoso e il set di somministrazione endovenosa al set di riscaldamento per fluidi Hotline prima del collegamento al paziente.



Passaggio 2

- › ACCENDERE il pulsante di alimentazione.
- › Ispezionare l'estremità sul lato paziente del set di riscaldamento per fluidi Hotline alla ricerca di perdite per confermare l'integrità dei percorsi endovenosi.

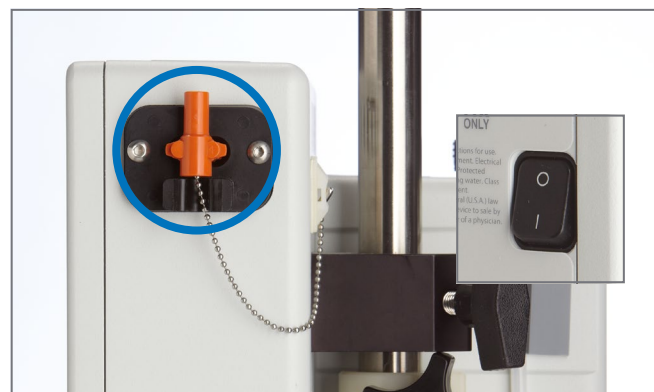

Passaggio 4

- › Dopo l'uso, SPEGNERE l'interruttore di alimentazione.
- › Rimuovere il set di riscaldamento per fluidi Hotline e inserire il connettore per il reflusso nella presa.

icumedical
human connections

Dépannage

Assenza di alimentazione

- › Verificare che il riscaldatore Hotline sia attaccato correttamente all'alimentazione.
- › Confermare che l'interruttore di alimentazione sia ACCESO (nota: se il riscaldatore Hotline è collegato e l'interruttore di alimentazione è ACCESO, il LED verde o rosso si illumina).

Controllare l'allarme per gli articoli monouso

- › Verificare che il set di riscaldamento per fluidi Hotline sia installato correttamente.
 - Spingere saldamente il connettore a cannule gemelle nella presa sul lato destro del riscaldatore Hotline (nota: SPEGNERE l'interruttore di alimentazione prima di sostituire il set di riscaldamento per fluidi Hotline).
 - Se l'allarme non si risolve, sostituire il set di riscaldamento per fluidi Hotline. ACCENDERE l'interruttore di alimentazione e verificare che l'allarme sia risolto.
 - Se l'allarme non è risolto, rimuovere il set di riscaldamento per fluidi Hotline dal servizio.

Add Allarme Aggiungere la soluzione di ricircolo

- › Verificare il livello nel serbatoio: SPEGNERE l'interruttore di alimentazione, rimuovere il set di riscaldamento per fluidi Hotline, se installato, e aggiungere la soluzione di ricircolo fino al livello massimo.

Se le soluzioni suggerite non correggono il problema, sospendere l'uso del riscaldatore per fluidi Hotline, rimuoverlo dal servizio e contattare ICU Medical.

Allarme di sovratemperatura

- › Verificare che il set di riscaldamento per fluidi Hotline non abbia pieghe o altre ostruzioni.
- › Controllare eventuali blocchi d'aria:
 - SPEGNERE l'interruttore di alimentazione, rimuovere il set di riscaldamento per fluidi e agitare delicatamente il riscaldatore Hotline per rimuovere l'aria.
 - Collegare il set di riscaldamento per fluidi Hotline e ACCENDERE l'interruttore di alimentazione.
 - Se l'allarme non è risolto, rimuovere il set di riscaldamento per fluidi Hotline dal servizio e restituirlo per farlo riparare o sostituire.

Interferenza elettrica (ricezione o trasmissione):

- › Allontanare il riscaldatore Hotline dal dispositivo interessato.
- › Collegare il riscaldatore Hotline a un circuito elettrico separato (se il problema persiste, informare ICU Medical o il proprio distributore ICU Medical locale).