

Guide de formation pour kit de perfusion Cleo™ 90




Veuillez vous reporter à la notice d'utilisation pour obtenir une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et précautions.

Insertion dans le site et connexion de la tubulure



1. Se laver et se sécher les mains.
2. Préparer le site et le laisser sécher.
3. Dévisser le capuchon pour le retirer.
4. Inspecter le dispositif (adhésif et aiguille d'insertion).
5. Appuyer fermement jusqu'à entendre un déclic et maintenir pendant 5 secondes puis retirer délicatement en tirant bien droit.
6. Vérifier que l'aiguille s'est bien rétractée.
7. Appuyer pour bien fixer l'adhésif.
8. Connecter la tubulure et purger (suivre les indications de la notice d'utilisation).
9. Pincer les côtés du raccord du site et faites glisser en arrière pour ouvrir complètement.
10. Fixer la tubulure au site en trouvant la position la plus adaptée. Cleo 90 comporte 8 positions possibles.
11. Refermer le raccord (un clic sonore confirme la fermeture).
12. Purger la canule de médicament.
 - › La canule de 6 mm a un volume de purge de 0,002 ml.
 - › La canule de 9 mm a un volume de purge de 0,003 ml.

Déconnexion

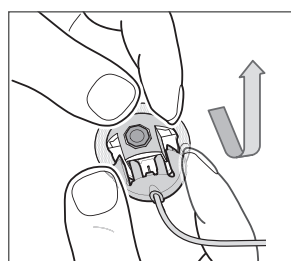

Ouvrir le raccord en pinçant les côtés du raccord du site et faire glisser vers l'arrière pour l'ouvrir complètement.

Retrait du site d'injection

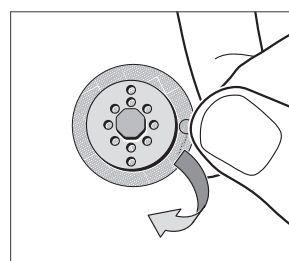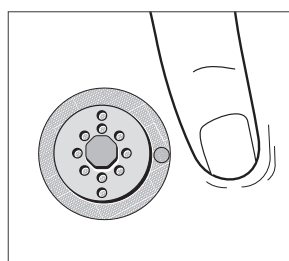

Remplacement du cathéter Cleo 90

Changer le cathéter conformément aux procédures établies par votre établissement.

* Avertissement : ne remplissez jamais la tubulure avec un médicament ou de l'insuline lorsque le kit de perfusion est connecté à votre corps, sinon vous pourriez administrer un bolus non intentionnel de médicament.

© 2026 ICU Medical Inc. | C26-5739-2-EMEA-FR

Ce produit est conforme à la législation en vigueur et porte le marquage CE correspondant (2797).

Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au mode d'emploi du fabricant. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi officiel. Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation approprié.

icumedical
human connections

+33 (0)1 58 42 50 00 | www.icumed.com