


Wichtig: Ausführliche Anweisungen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie in der mit dem Produkt gelieferten Bedienungsanleitung, spezifische Informationen zur Verwendung von Einwegsets in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.

Warnhinweis: Befüllen Sie zuerst das Hotline-System mit der Umlauflösung, bevor Sie es an die intravenöse Verlängerungsleitung anschließen, um sicherzustellen, dass es keine Undichtigkeit zwischen dem Weg der Umlauflösung und dem intravenösen Weg gibt.

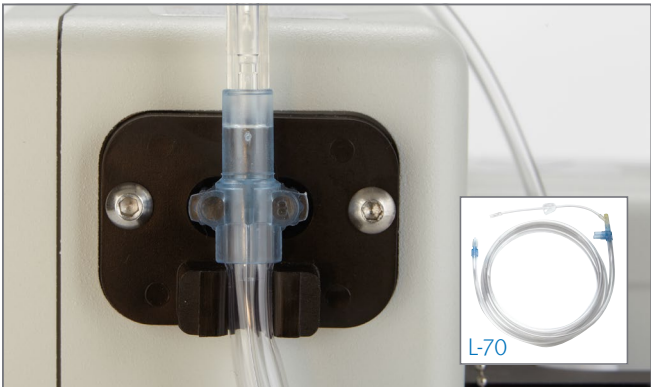

Schritt 1

- Pl Stecken Sie den Doppelschlauch-Verbinder des Hotline Flüssigkeitswärmersets in die Buchse.




Schritt 2

- Schalten Sie den Netzschalter EIN.
- Überprüfen Sie die Patientenseite des Hotline Flüssigkeitswärmersets auf Undichtigkeiten, um die Unversehrtheit der intravenösen Wege zu bestätigen.



Schritt 3

- Schließen Sie die Infusionslösung und das intravenöse Verabreichungsset an das Hotline Flüssigkeitswärmerset an.
- Entlüften Sie das intravenöse Verabreichungsset und das Hotline Flüssigkeitswärmerset vollständig, bevor Sie es an den Patienten anschließen.

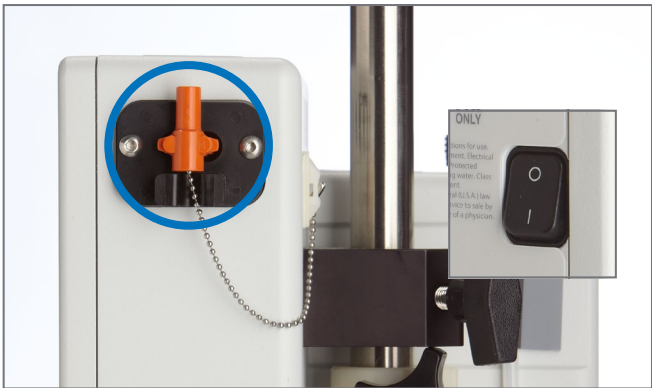

Schritt 4

- Schalten Sie nach dem Gebrauch den Netzschalter AUS.
- Entfernen Sie das Hotline Flüssigkeitswärmerset und stecken Sie den Rückflusstopfen in die Buchse.

Fehlerbehebung

Kein Strom

- › Vergewissern Sie sich, dass der Hotline Wärmer korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist.
- › Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf EIN steht (Hinweis: Wenn der Hotline Wärmer eingesteckt ist und der Netzschalter auf EIN steht, leuchtet die grüne oder rote LED).

Prüfen Sie den Alarm für Einwegprodukte

- › Stellen Sie sicher, dass das Hotline Flüssigkeitswärmerset richtig installiert ist.
 - Stecken Sie den Doppelschlauch-Verbinder fest in die Buchse auf der rechten Seite des Hotline Wärmers (Hinweis: Schalten Sie den Netzschalter AUS, bevor Sie das Hotline Flüssigkeitswärmerset austauschen).
 - Wenn der Alarm nicht erloschen ist, ersetzen Sie das Hotline Wärmerset. Schalten Sie den Netzschalter EIN und vergewissern Sie sich, dass der Alarm erloschen ist.
 - Wenn der Alarm nicht erloschen ist, nehmen Sie den Hotline Wärmer außer Betrieb.

Alarm für Rückauflösung

- › Prüfen Sie den Füllstand im Reservoir - schalten Sie den Netzschalter AUS, entfernen Sie das Hotline Flüssigkeitswärmerset (falls vorhanden) und füllen Sie die Rückauflösung bis zum maximalen Füllstand auf.

Übertemperaturalarm

- › Überprüfen Sie den Hotline Flüssigkeitswärmer auf Knicke oder andere Einschränkungen
- › Prüfen Sie auf Lufteinschluss:
 - Schalten Sie den Netzschalter auf AUS, entfernen Sie das Hotline Wärmerset und schütteln Sie den Hotline Wärmer vorsichtig, um die Luft zu entfernen.
 - Stecken Sie das Hotline Flüssigkeitswärmerset ein und schalten Sie den Netzschalter ein.
 - Wenn der Alarm nicht erloschen ist, nehmen Sie den Hotline Wärmer außer Betrieb und schicken Sie ihn zur Reparatur oder zum Austausch ein.

Elektrische Interferenzen (Empfang oder Übertragung):

- › Entfernen Sie den Hotline Wärmer von dem betreffenden Gerät.
- › Schließen Sie den Hotline Wärmer an einen separaten Stromkreis an (wenn das Problem weiterhin besteht, benachrichtigen Sie ICU Medical oder Ihren örtlichen ICU Medical-Händler).

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, verwenden Sie den Hotline Wärmer nicht weiter, sondern nehmen ihn außer Betrieb und kontaktieren Sie ICU Medical.