



Guida di riferimento per Clave™ Neutron™

Connettore a pressione neutra
senza ago



Priming e collegamento

- Rimuovere il dispositivo/set Clave Neutron dalla confezione e collegare una siringa di lavaggio al luer femmina.
- Capovolgere il dispositivo e infondere la soluzione di lavaggio. Tirare lo stantuffo della siringa e infondere nuovamente la soluzione di lavaggio per il priming e l'attivazione del dispositivo.
- Collegare il connettore/set Clave Neutron al raccordo del catetere del paziente.
- Infondere la soluzione di lavaggio rimanente.
- Rimuovere la siringa di lavaggio e smaltirla.



Disinfezione e protezione

- Prima di accedere a un connettore Clave Neutron, disinfettare seguendo le istruzioni per l'uso o il protocollo della struttura.*



Somministrazione

- Collegare il tubo per infusione endovenosa, la siringa o il supporto per provette ematiche al connettore Clave Neutron inserendo il luer e ruotando fino a ottenere un serraggio per attrito.
- Non serrare eccessivamente il luer oltre tale limite in quanto ciò potrebbe danneggiare sia il luer che il connettore Clave Neutron.



Lavaggio dopo ogni uso

- Lavare il connettore Clave Neutron con normale soluzione salina o in base al protocollo della struttura.
- Eseguire un lavaggio di routine in conformità al protocollo della struttura per preservare la pervietà del catetere.
- Sostituire il connettore Clave Neutron in conformità al protocollo della struttura e alle linee guida CDC.

Suggerimenti

- Se si utilizza un set Neutron con un filtro, orientare il filtro durante l'approntamento iniziale, in modo che l'ingresso sia verticalmente sopra l'uscita. Il filtro si riempirà automaticamente nella posizione verticale.
- Le procedure di infusione automatica non devono superare 350 psig o 10 ml al secondo di mezzo di contrasto. I set di tubi ad alta pressione o i set di prolunghe rimovibili realizzati con tubi ad alta pressione sono indicati nel nome/nella descrizione del prodotto.
- Per scollegare, tenere il connettore Clave Neutron e ruotare il luer di accoppiamento allontanandolo da Clave Neutron fino ad allentarlo.

Avvertenza: i connettori Clave possono essere incompatibili con alcuni connettori luer maschio, comprese le siringhe di vetro preriempite. Per evitare danni a carico dei dispositivi Clave, delle siringhe o dei connettori luer maschio con conseguenti ritardi nella somministrazione del farmaco e possibili eventi avversi gravi, gli utenti devono verificare che i connettori luer o le siringhe di accoppiamento abbiano un diametro interno compreso tra 1,587 mm (0,062") e 2,794 mm (0,110"). Prima di utilizzarlo con un dispositivo Clave, verificare il diametro interno del connettore luer maschio della siringa di accoppiamento. Non utilizzare prodotti che non rispettano i suddetti parametri dimensionali.

* Disinfettare secondo le istruzioni per l'uso di ICU Medical Neutron = disinfettare con una salvietta imbevuta di alcol isopropilico al 70% con un movimento circolare aggressivo per 3 secondi e lasciare asciugare.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente e reca il marchio CE corrispondente.
Per informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza aggiuntive, consultare le istruzioni per l'uso.



L'opzione di lavaggio con soluzione salina del connettore Clave Neutron è concepita per contribuire a ridurre il rischio di trombocitopenia indotta da eparina (TIE).

icumedical
human connections