

Guía de referencia de

Conector de NanoClave™

Sistemas de infusión multipuertos



Desinfectar para proteger



- Al acoplar un nuevo conector NanoClave, purgue cada puerto lateral del conector y la línea principal del equipo acoplando la solución de purgado deseada o la solución salina normal, de acuerdo con el protocolo del centro.
- Antes de acceder a un conector NanoClave, desinfecte siempre el puerto de inyección con el antiséptico aprobado por el protocolo del centro.
- Limpie el puerto de inyección de conformidad con el protocolo del centro sobre tiempos de limpieza y secado adecuados.

Administrar



- Acople el tubo intravenoso o la jeringa al conector NanoClave introduciendo el luer y girando hasta lograr un ajuste por fricción.
- No apriete en exceso un luer más allá del ajuste por fricción puesto que puede dañar tanto el luer como el conector NanoClave.

Lavar después de cada uso



- Lave el conector NanoClave del colector según el protocolo del centro. Después del uso con sangre, el colector NanoClave se puede lavar y no es necesario cambiarlo.
- Realice un lavado rutinario de acuerdo con el protocolo del centro para mantener la permeabilidad del catéter.
- Cambie el colector NanoClave de conformidad con el protocolo del centro.



La opción de lavado salino de NanoClave está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina (TIH).

icumedical
human connections

El producto cumple con la legislación vigente y cuenta con el correspondiente marcado CE. Para obtener más información, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte las instrucciones de uso del fabricante.