




Product Reference Guide

グリッパープラス™


グリッパープラス・パワー™ P.A.C.

植込みポート用医薬品注入器具
針刺し防止機構付きポート専用針

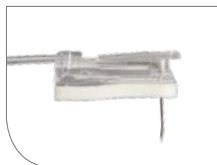

グリッパープラス™

- › 取り外し可能なグリップ
- › 針サイズを識別できるカラーのクランプ
- › はっ水性のパッド

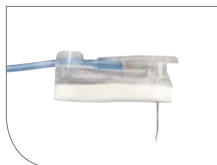

グリッパープラス・パワー™ P.A.C. 高圧注入用

- › チューブの色（青色）で高圧注入用であることを識別
- › 最大注入圧をクランプに印字
- › はっ水性のパッド

1. 穿刺



- › 施設の基準に従い穿刺部位を準備、消毒します。
- › プライミング後、白いグリップを持ち、ニードルガードを外します。
- › ポートに対して直角に穿刺します。

2. グリップを外す



- › 白いグリップをスライドさせて外します。
- › ドレッシング材を貼ります。

3. 抜針



- › ドレッシング材を外します。
- › グリッパープラスのベースの両側に指を置いてポートを安定させます。

4. セーフティアームに指をかける



- › もう片方の手の指をセーフティアームの先端に置き、セーフティアームを上げます。

5. 「カチッ」と音がして動かなくなることを確認



- › 「カチッ」と音がして動かなくなること（針刺し防止機構が正常に作動）を確認してください。
- › 速やかに鋭利器材専用医療廃棄物容器に入れ廃棄します。

販売名:グリッパープラス
認証番号:220AIBZX00041000

販売名:グリッパープラス・パワー P.A.C.
認証番号:225AIBZX00015000

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者

ICUメディカルジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

受注センター：0120-582-855

icumedical
human connections

For safe and proper use, refer to the Instructions for Use.

© 2026 ICU Medical Inc. | www.icumed.com | C26-6783-JP | 0802002 | Page 1 of 1

www.icumed.com