

Guida all'uso del set per infusione Cleo™ 90




Consultare le Istruzioni per l'uso per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni.

Inserimento nel sito e collegamento del set tubo



- 1. Lavarsi e asciugarsi bene le mani.**
- 2. Preparare il sito di applicazione e lasciarlo asciugare.**
- 3. Ruotare il cappuccio per rimuoverlo.**
- 4. Esaminare il dispositivo verificando che siano presenti sia l'adesivo che l'ago di inserimento.**
- 5. Premere con decisione fino a sentire un clic; tenere premuto per 5 secondi; staccare con un movimento rettilineo.**
- 6. Verificare che l'ago si sia ritirato.**
- 7. Premere per fissare l'adesivo.**
- 8. Collegare il tubo e riempire seguendo il manuale d'uso della pompa.***
- 9. Premere verso l'interno i braccetti del connettore al sito e farlo scorrere per aprirlo completamente.**
- 10. Collegare il tubo al sito scegliendo la posizione più adeguata. Il dispositivo Cleo 90 ha 8 posizioni possibili.**
- 11. Chiudere il connettore; un clic udibile ne indica la chiusura corretta.**
- 12. Riempire la cannula con il farmaco.**
 - › Il volume di riempimento della cannula di 6 mm è pari a 0,002 ml.
 - › Il volume di riempimento della cannula di 9 mm è pari a 0,003 ml.

Scollegamento

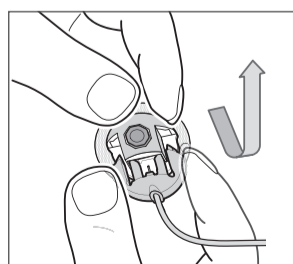

Aprire il connettore premendone i braccetti verso l'interno e facendolo scorrere per aprirlo completamente.

Ritiro del sito di iniezione

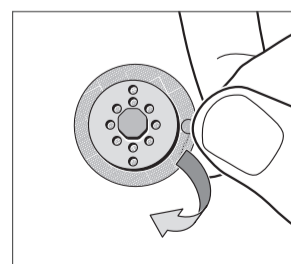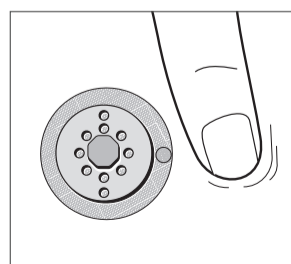

Sostituzione del catetere Cleo 90

Sostituire il catetere in base alla prassi e alle procedure della propria struttura.

* Avvertenza: Non riempire mai la cannula con farmaco o insulina mentre il set per infusione è collegato al corpo, altrimenti si potrebbe provocare la somministrazione accidentale di un bolo di farmaco.