



68.2

# CADD-Solis VIP™

Sistema de infusión ambulatoria a domicilio

Sistema de infusión inteligente multiterapia fácil de usar a diario


**icumedical**  
human connections

## Diseñado para ser fácil de usar y permitir un uso seguro en casa

La bomba de infusión ambulatoria CADD-Solis VIP es ideal para su uso en casa, con un diseño pequeño y portátil, y una interfaz fácil de usar. Las pantallas intuitivas de ayuda permiten solucionar los problemas en casa y pueden limitar la necesidad de intervención del médico. Las pantallas codificadas por colores proporcionan un estado instantáneo del progreso de la terapia, mientras que los depósitos CADD™ contribuyen a la seguridad de la medicación y a la protección del flujo libre de la administración de fluidos. Con 5 modos de administración versátiles, la bomba ambulatoria CADD-Solis VIP le ayuda a proporcionar cuidados de infusión desde la comodidad de su hogar.



Las pantallas intuitivas de estado del suministro muestran el progreso de la infusión

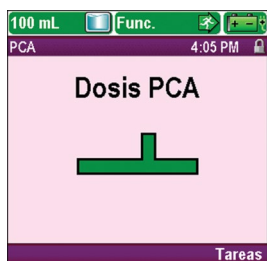

### PCA

Tratamiento del dolor con los siguientes métodos de administración de forma individual o combinados entre sí: Velocidad "continuous" (continua); dosis "PCA" y "clínician bolus" (bolo clínico)




### Taper (Gradual)

Velocidad continua con reducción opcional al principio y al final



### Intermittent (Intermitente)

Volumen específico a un intervalo programado durante una duración determinada

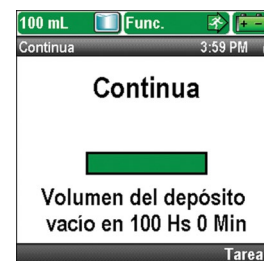

### Continuous (Continua)

Velocidad constante y programada



### Step (Paso por paso)

Incremento de la velocidad desde una velocidad inicial hasta una velocidad continua máxima especificada para un volumen total

La bomba ambulatoria CADD-Solis VIP versátil está indicada para infusiones intravenosas, intraarteriales, subcutáneas, intraperitoneales, perineurales, en el sitio quirúrgico, en el espacio epidural o en el espacio subaracnoideo, con 5 modos de administración.

# Ayudar a aumentar la independencia del paciente

## Pantallas de ayuda para alarmas


Las pantallas de ayuda de las alarmas de la bomba ayudan a resolver las condiciones de alarma con instrucciones guiadas en pantalla. Estas pantallas pueden ayudar a reducir la intervención del clínico y las visitas sobre el terreno y a mantener la continuidad de la infusión.



Ejemplos de ilustraciones de pantallas de ayuda de alarmas de alta presión que guían al paciente a través del proceso de resolución de problemas.

## Alarmas diferenciadas


Alarmas diferenciadas por color y sonido con prioridad alta (rojo), media (ámbar) y baja (azul)

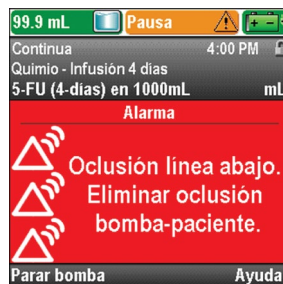

Alarma de prioridad alta




Alarma de prioridad media

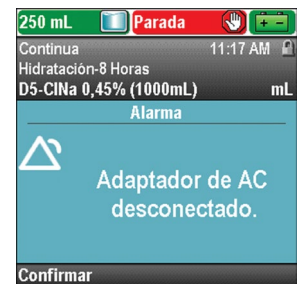


Alarma de prioridad baja

## Informes de la bomba

Los informes de la bomba proporcionan datos de tendencias y ayudan a evaluar a los pacientes.

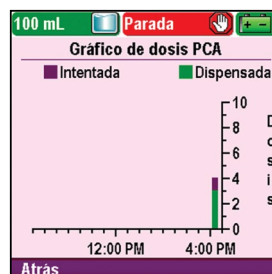


Pantalla de informe de dosificación

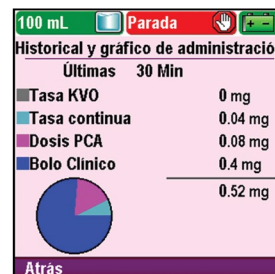

Pantalla de informe de la historia de administración

# Sistema de infusión ambulatoria CADD-Solis VIP

Mayor comodidad para los pacientes y el personal de enfermería

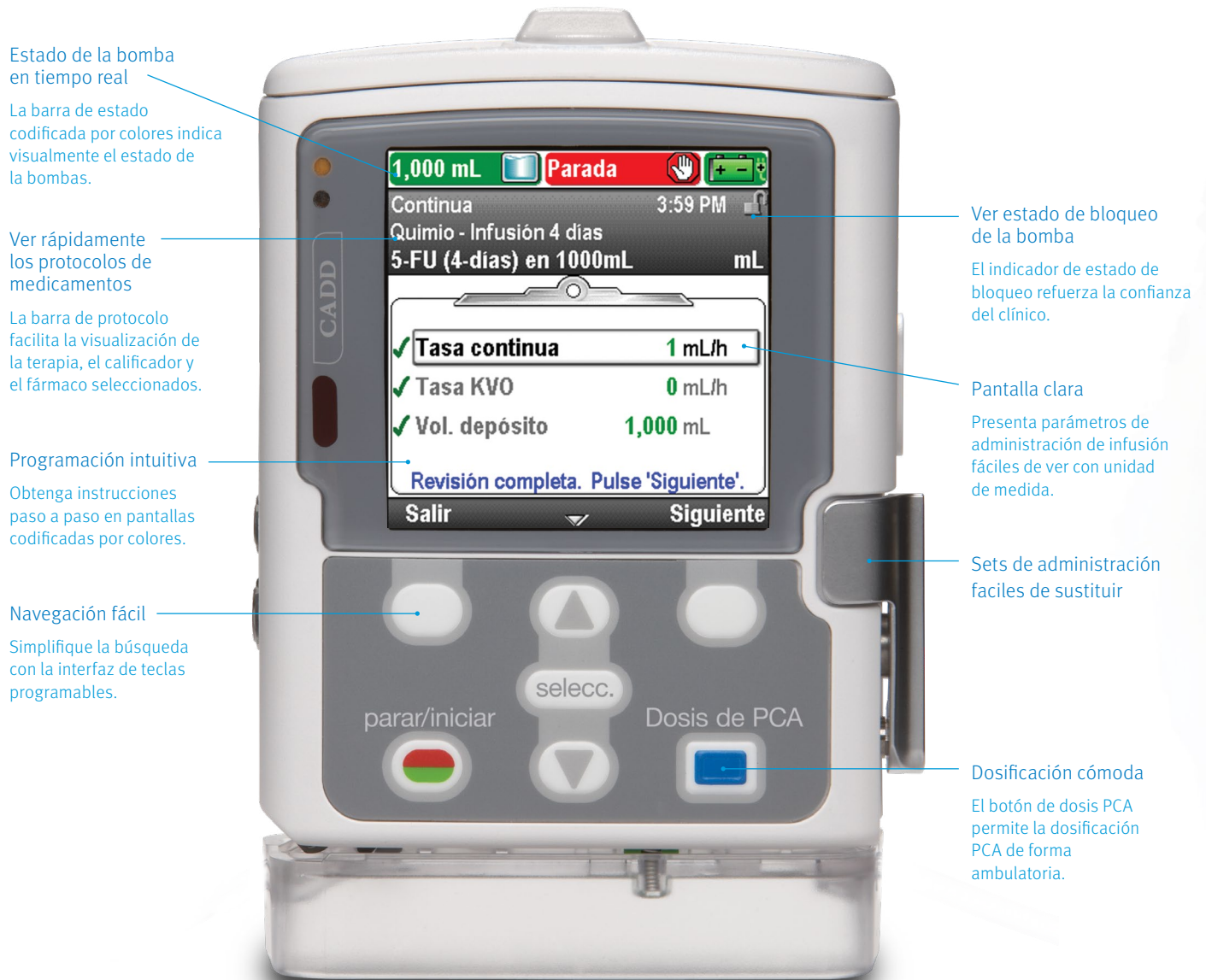

Apoye hoy mismo la independencia de sus pacientes.

Llame al número +34 93 363 84 00 o visite [www.icumed.com](http://www.icumed.com) para obtener más información.

El producto cumple la legislación vigente y dispone del correspondiente marcado CE (2797).  
Para obtener más información, advertencias y/o precauciones de seguridad, consulte el manual del usuario del fabricante.

**icumedical**  
human connections