



Guide de référence du produit


Réchauffeur de solutions Hotline™ (HL-90)

Tubulures de réchauffement de solutions Hotline™ (L-70, L-70NI)

Guide détaillé

Important: consulter le manuel de l'opérateur fourni avec le produit pour connaître les instructions détaillées, les contre-indications, les avertissements et les mises en garde, ainsi que le mode d'emploi approprié pour obtenir des informations spécifiques sur l'utilisation des tubulures à usage unique.

Avertissement: effectuer la purge de la voie de la solution de recirculation avant de connecter la tubulure d'extension intraveineuse, afin de confirmer l'absence de brèche entre le trajet de la voie de la solution de circulation et la voie intraveineuse.

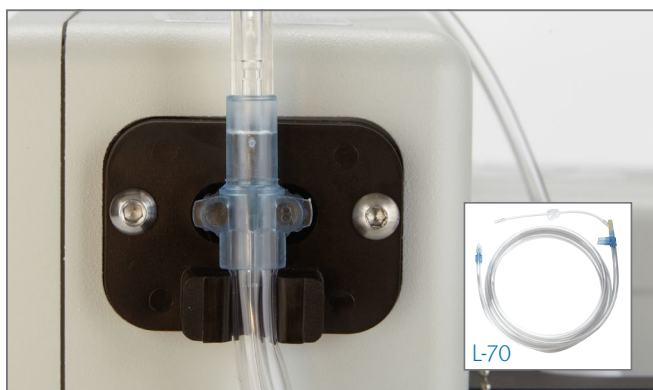

Étape 1

- Introduire le connecteur à double fiche de raccordement de la tubulure de réchauffement de solutions Hotline dans la prise sur le côté droit du réchauffeur.




Étape 3

- Connecter la solution IV et la tubulure d'administration intraveineuse à la tubulure de réchauffement de solutions Hotline.
- Purger complètement la tubulure d'administration intraveineuse et la tubulure de réchauffement de solutions Hotline avant de les connecter au patient.



Étape 2

- Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche.
- Vérifier l'absence de fuites du côté patient de la tubulure de réchauffement de solutions Hotline afin de confirmer l'intégrité des voies intraveineuses.

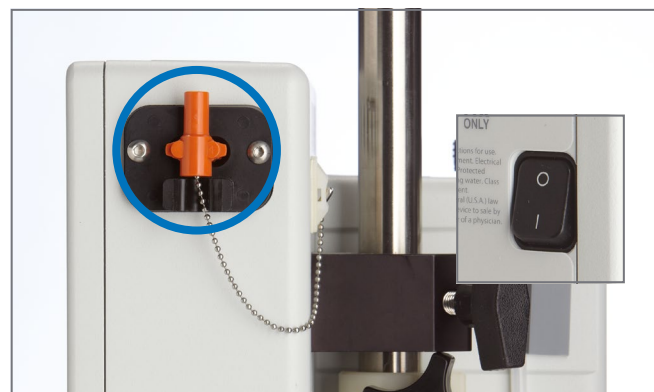

Étape 4

- Après utilisation, mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position Arrêt.
- Retirer la tubulure de réchauffement de solutions Hotline et insérer le bouchon de anti reflux dans la prise.

Dépannage

Pas d'alimentation

- › Vérifier que le réchauffeur Hotline est correctement branché.
- › Vérifier que l'interrupteur d'alimentation est sur la position Marche (remarque : si le réchauffeur Hotline est branché et que l'interrupteur d'alimentation est sur la position Marche, le voyant vert ou rouge s'allume).

Alarm vérifier les consommables

- › Vérifier que la tubulure de réchauffement de solutions Hotline est correctement installée.
 - Pousser le connecteur à double fiche de raccordement fermement dans la prise sur le côté droit du réchauffeur Hotline (remarque : mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position Arrêt avant de remplacer la tubulure de réchauffement de solutions).
 - Si l'alarme ne s'arrête pas, remplacer la tubulure de réchauffement de solutions Hotline. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche et vérifier que l'alarme s'est arrêtée.
 - Si l'alarme ne s'est pas arrêtée mettre le réchauffeur Hotline hors service.

Alarm Ajouter une solution de recirculation

- › Vérifier le niveau du réservoir — mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position Arrêt, retirer la tubulure de réchauffement de solutions Hotline si elle est installée, et ajouter de la solution de recirculation jusqu'au niveau maximum.

Alarme Température excessive

- › Inspecter la tubulure de réchauffement de solutions Hotline à la recherche de plicature ou d'autres restrictions.
- › Vérifier l'absence de blocage d'air :
 - Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position Arrêt, retirer la tubulure de réchauffement de solutions Hotline et secouer doucement le réchauffeur Hotline pour éliminer l'air.
 - Brancher la tubulure de réchauffement de solutions Hotline et mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position Marche.
 - Si l'alarme ne s'arrête pas, mettre le réchauffeur Hotline hors service et le renvoyer pour réparation ou remplacement.

Interférences électriques

(en réception ou en transmission):

- › Éloigner le réchauffeur Hotline du dispositif concerné.
- › Brancher le réchauffeur Hotline sur un circuit électrique distinct (si le problème persiste, notifier ICU Medical ou votre distributeur ICU Medical local).

Si les solutions proposées ne permettent pas de résoudre le problème, cesser d'utiliser le réchauffeur de solutions Hotline et contacter ICU Medical.