



CADD-Solis™

Sistema infusionale

Design moderno, portatile e versatile per la gestione del dolore

icumedical
human connections

Sistema infusionale CADD-Solis

Un'unica piattaforma infusionale per la gestione del dolore

Possibilità di combinare più metodi di somministrazione per soddisfare le esigenze mediche

- › Velocità continua
- › Bolo intermittente programmato (PIB)
- › Analgesico controllato dal paziente (PCA)
- › Analgesico epidurale controllato dal paziente (PCEA)
- › Bolo medico





PCA e.v.

Gestione endovenosa del dolore grazie all'impiego, singolo o combinato, dei seguenti metodi di somministrazione:

- › Velocità continua
- › Dose PCA
- › Bolo medico
- › Somministrazione con codice dose o cavo dose remota PCA



Analgesico epidurale

Somministrazione epidurale e subaracnoidea in combinazione con bolo intermittente programmato (PIB) e/o PCEA.



Infusione di analgesici per il blocco nervoso periferico e al sito chirurgico

Somministrazione di analgesici per il blocco nervoso periferico e infusione al sito chirurgico con la possibilità di programmare PCA e/o impiegare il bolo intermittente programmato (PIB). Il design portatile permette la deambulazione del paziente.

Standardizzazione su un'unica piattaforma e differenziazione delle terapie per supportare la sicurezza del paziente



I prodotti CADD™ dotati di connettori NRFit™ permettono di ridurre il rischio di collegamenti errati

Le schermate delle pompe distinte per colore consentono di differenziare le terapie

100 mL	Funzione
IV PCA Post Operatorio HYDROMORPHONE 0.2 mg/mL	
Home Premere 'Seleziona' per modificare	
Infus. continua	0.2 mg/hr
Dose PCA	0.1 mg
Blocco PCA	5 Min
Dosi max /hr	1.2 mg
Rapporti	Attività

50 mL	In arresto
PCA Dose Standard Morfina 1 mg/mL	
Home Premere 'Seleziona' per modificare	
Infus. continua	1 mg/hr
Dose PCA	0.5 mg
Blocco de PCA	15 Min
Dosi max /hr	2.5mg
Rapporti	Attività

100 mL	Funzione
PCA Travagli e Parto Operatorio Fentanyl/Bupivacaine mL	
Home Premere 'Seleziona' per modificare	
Infus. continua	8 mL/hr
Dose PCA	4 mL
Blocco PCA	10 Min
Dosi max /hr	20 mL
Rapporti	Attività

249.8 mL	Funzione
Continua Solo Continua Ropivacaina 0,1%	
Home Premere 'Seleziona' per modificare	
Infus. continua	5 mL/hr
Vol. serbatoio	249.8 mL/hr
Rapporti	Attività

49.7 mL	Funzione
Continua Continua Sottocutanea HYDROMORPHONE 1mg/mL	
Home Premere 'Seleziona' per modificare	
Infus. continua	0.2 mL/hr
Vol. serbatoio	49.7 mL/hr
Rapporti	Attività

Le funzioni della pompa intelligente favoriscono la sicurezza del paziente

- › I grafici e i dati di infusione a colori su schermo, forniscono una valutazione immediata del paziente e il suo monitoraggio
- › La libreria integrata contiene fino a 500 protocolli modificabili, rispettando i limiti di sicurezza, per soddisfare specifiche esigenze del paziente
- › Il software aggiuntivo PharmGuard™ può concorrere a ridurre gli errori di programmazione grazie a:
 - limiti di programmazione minimi e massimi flessibili e fissi
 - utilizzo di caratteri maiuscoli/minuscoli per la denominazione parziale del farmaco
 - supporto per la denominazione completa dei farmaci
 - nessuno zero finale



Grafico del dosaggio



Grafico della somministrazione

Funzioni del sistema di infusione ambulatoriale CADD-Solis

Indicazione visiva dello stato della pompa con barra di stato distinto per colore

Protocollo del farmaco visualizzato nella barra dei protocolli con terapia, approvatore e farmaco selezionati

Navigazione mediante interfaccia tasti funzione



Supporto alla sicurezza con l'indicatore di stato di blocco della tastiera

La schermata principale mostra i parametri di somministrazione specifici del paziente e l'unità di misura correlata

Attacco monouso protetto con leva di chiusura della cassetta e blocco tasti

Somministrazione PCA con tasto dedicato dose PCA o cavo dose remota portatile

Serbatoi per cassette di somministrazione CADD™

- › I serbatoi resistenti e indipendenti si bloccano direttamente sulle pompe contribuendo a garantire la sicurezza della somministrazione
- › La pompa e il serbatoio occupano uno spazio ridotto
- › Varie dimensioni e colori disponibili permettono la flessibilità terapeutica nonché l'identificazione visiva
- › La funzione di interruzione del flusso aiuta a evitare la somministrazione continua del farmaco
- › Il sistema è dotato di connettori NRFit™ che permettono di ridurre il rischio di collegamenti errati



Continuità della terapia con la pompa CADD-Solis VIP™ per uso domestico

- › Un sistema ambulatoriale compatto che supporta la mobilità del paziente
- › Le schermate di aiuto possono assistere i pazienti nella risoluzione dei problemi e ridurre la necessità di rivolgersi al medico

Specifiche e requisiti



CADD-Solis Ambulatory Infusion Pump Specifications

Indicazioni	Infusione endovenosa, intra-arteriosa, sottocutanea, intraperitoneale, in prossimità dei nervi, in un sito intraoperatorio (tessuto molle, cavità corporea/sito della ferita chirurgica), spazio epidurale o spazio subaracnoideo. La pompa è destinata a essere impiegata per terapie che richiedono una velocità di infusione continua e/o un bolo intermittente e/o con dosi a richiesta controllate dal paziente e/o boli medici.
Dimensioni della pompa	1,6 poll. x 4 poll. x 5 poll. cassetta o altri accessori esclusi
Dimensioni dello schermo	2,12 poll. x 2,12 poll. (320 pixel x 320 pixel)
Peso	21 once (595 g) con 4 batterie alcaline AA, esclusi altri accessori.
Libreria protocolli integrata	Memorizza fino a 500 protocolli
Sicurezza	Blocco cassetta/tastiera e tre livelli di accesso di sicurezza personalizzabili: codice tastiera, codice medico e codice amministratore
Precisione	+/- 6% (nominale)
Modalità di somministrazione	Velocità continua; dose PCA; bolo clinico e bolo intermittente
Volume del serbatoio	Da 0 a 9999 mL; programmabile in incrementi di 1 mL, visualizzato in incrementi di 0,1 mL
Unità	Millilitri (mL), milligrammi (mg) e microgrammi (mcg)



Un impegno a garantire un eccezionale supporto tecnico e una formazione clinica costanti

L'impegno di ICU Medical nei confronti del cliente non termina con l'acquisto. L'azienda offre un servizio di supporto dedicato che mette a disposizione del cliente un bagaglio di competenze, risorse e opportunità di formazione tecnica, per favorire la massimizzazione del valore dell'investimento nei prodotti ICU Medical.

Scegliere ICU Medical equivale a scegliere un partner affidabile per ogni fase del percorso assistenziale, che offre:

- › Formazione tecnica e medica continua migliore del settore
- › Tecnici di assistenza sul campo dedicati
- › Materiali di istruzioni personalizzati

Connessioni più intelligenti. Trattamenti più sicuri.™

icumedical
human connections

Il prodotto è conforme alla normativa vigente e reca il marchio CE corrispondente.
Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del produttore.